


# レストレイナー 肩ベルト取付けマニュアル



## 作業を行う前に・・・

- ◇ マスキングテープと鉛筆があると、より綺麗に接着できます。

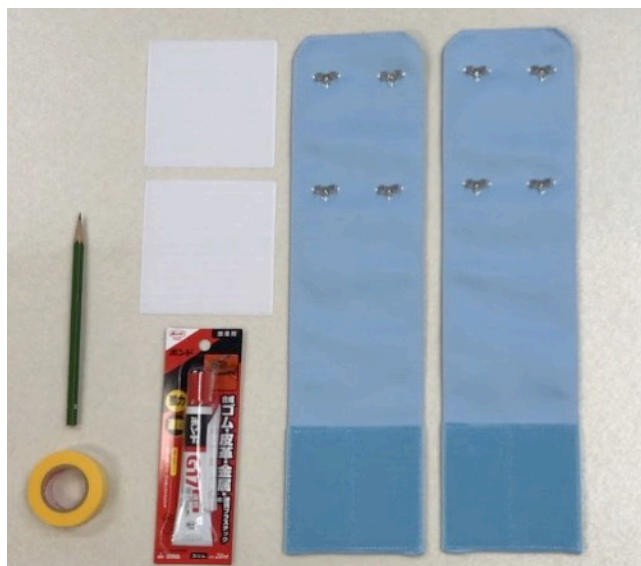

- \*作業を行う際は、レストレイナーを安定して置ける平坦な台などで行って下さい。
- \*接着剤を使用する際には、換気に注意してください。
- \*作業中の怪我や、製品の損傷・破損等につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。


**ホームページに取付け方法の動画を掲載しております。**

以下の検索またはQRコードにてアクセスして下さい。  
情報ページに作業動画が掲載されていますので是非ご覧ください。


レストレイナー 岩田

検索




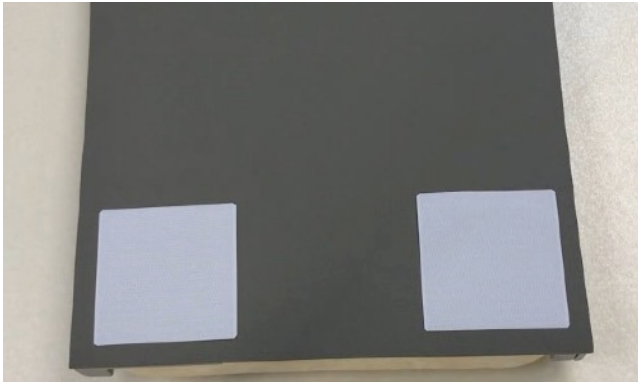


1. 本体裏面の肩側に、マジックテープを仮置きします。

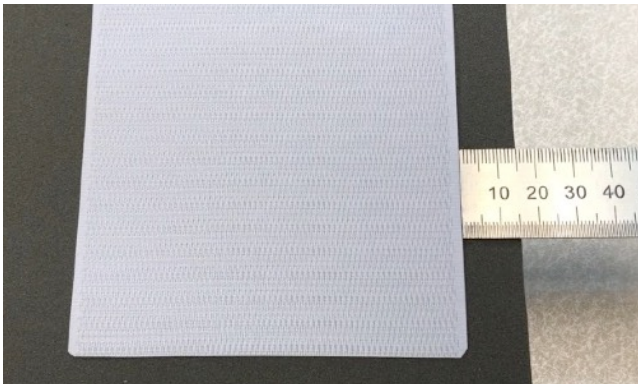


2. 標準的な位置は、本体側面から約1~2 cmです。

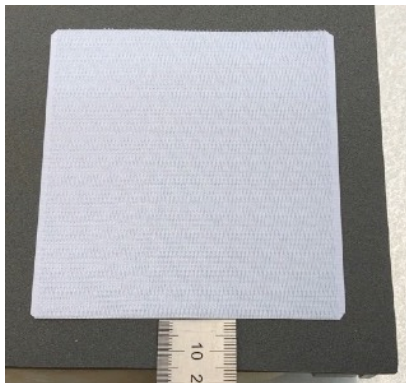

3. 本体肩側方向も約1~2 cmが標準的な位置となります。

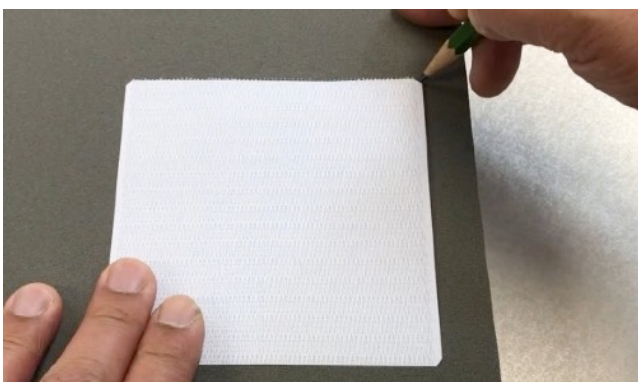


4. 位置が決まったら、鉛筆で四隅にマーキングをしていきます。

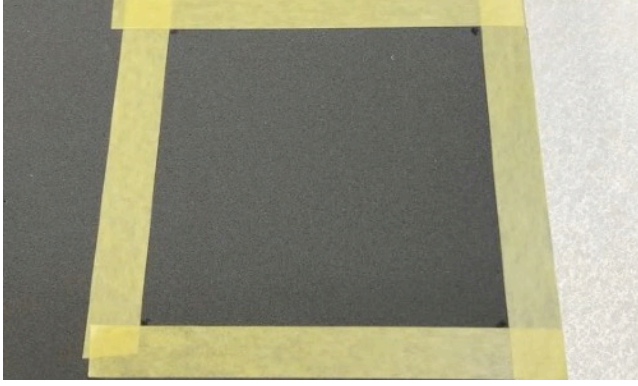


5. 四隅のマーキングに沿うように、マスキングテープを貼っていきます。




6. マジックテープに、接着剤を塗布していきます。  
付属のヘラで均一になるように、全面の塗り伸ばしてください。

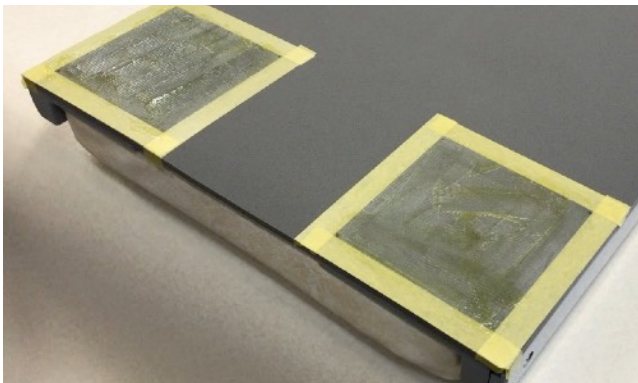


7. マスキングで囲んだ面も、接着剤を適量塗り伸ばしてください。

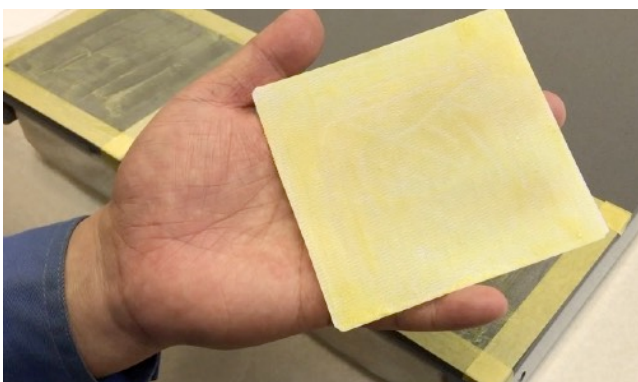


8. 塗り終わったら、接着面を2～3分乾かします。  
(接着剤の説明書も参考にしてください。)

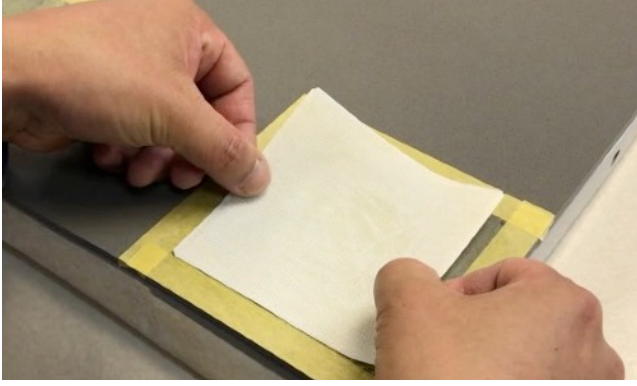


9. マスキングで囲んだ面へマジックテープを貼っていきます。

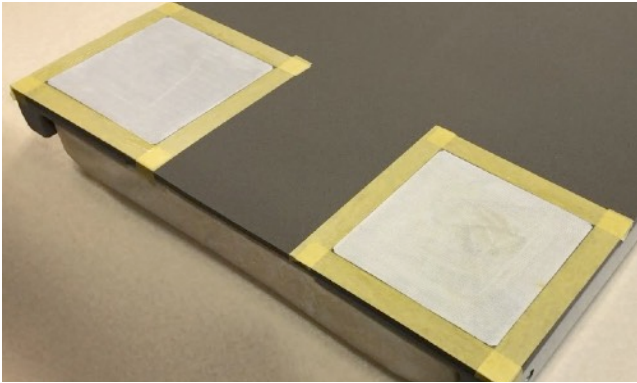

10. 指の腹で空気を押し出すようにして貼り付けると、綺麗に貼る事ができます。

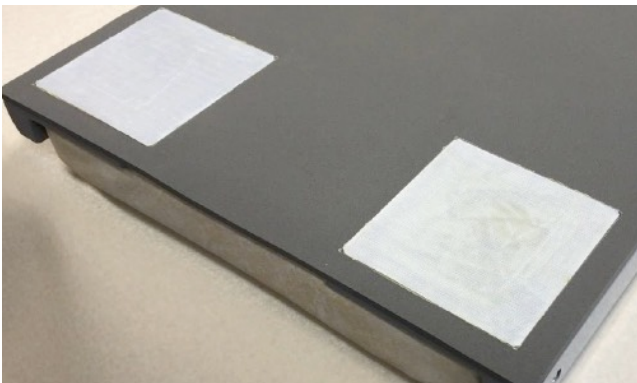

11. 接着剤が良く乾いてから、マスキングテープをゆっくりと全て剥がし、完成です。

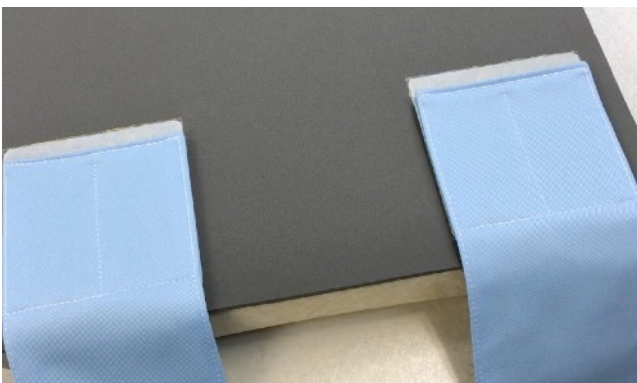

12. マジックテープに肩ベルトを貼り合わせ、ご使用ください。



有限会社

**岩田商店**

メディカル事業部

〒125-0033

東京都葛飾区東水元1-17-13-2F

電話03-3607-4686 FAX03-3608-2367

<https://www.iwata-company.com>