



小児用抑制具

レストレイナー・ペディ®


型式 (CR-3S・CR-3M・CR-3L)



通気性バツグンの柔らかネット
スツキリ快適



サイズはS・M・Lの3種類

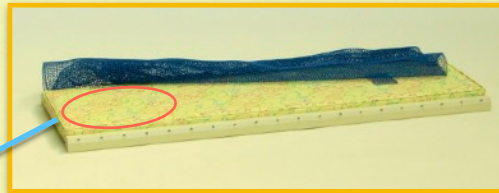

拡大

クッション部分に・・・



動物柄レザーを採用

ココがポイント

左右対称で使いやすい

本体の形状を長方形にする事で、両端のどちら側でも頭側(脚側)として使用できるので、動線を気にする事なくお使いいただけます。

ネットが掛けやすい

クッションの厚みを増やし、フック取り付け角度を調整したことにより、本体を平坦な場所に置いた際にネットをフックに掛けやすい形状になっています。

明るいイメージ色

本体は明るいベージュ色。クッションもベージュを基調としたカラフルな動物柄レザーを採用し、全体的に明るいイメージとしました。


使用方法

- ①本品を平坦で安定した診察台等の上に置きます。
- ②患者を本品の上に寝かせ、軽く押さえながら、ネットをフックにゆるみのないように、肩から膝下まで均等に掛けます。
- ③患者の状態を常に監視しながらご使用ください。

注意事項

製品に添付されている取扱説明書を熟読し、各注意事項を厳守の上、正しい使用方法にてお使いください。

詳細図

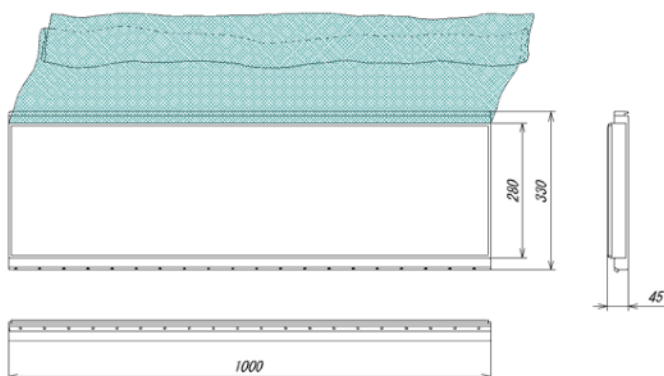

*図面はCR-3Lです。
*製造誤差により実際の寸法とは多少異なる場合があります。
ご了承ください。

各寸法・重量


型式	長さ	幅	厚み	重量
CR-3S	500	270	45	約2.4kg
CR-3M	700	300	45	約3.5kg
CR-3L	1000	330	45	約5.3kg

*単位：mm *寸法誤差±10mm *型式末尾がサイズを表しています。

*オプション品（別売）：肩ベルトセット 2本/1組
*交換部品（別売）：フックセット 10ヶ入り/1セット
ネット 1枚入り

*交換部品についてのご質問、ご購入につきましては、製品をお買い求めいただきました販売店もしくは当社までお問い合わせください。

各部名称

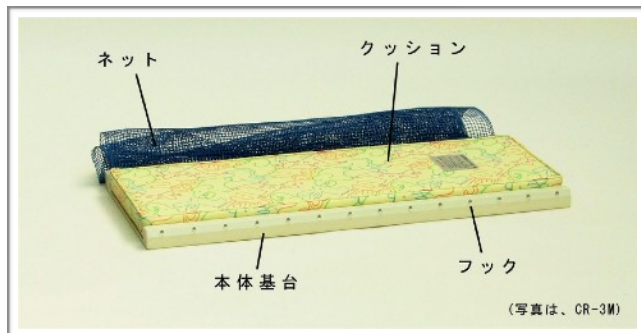

各部材質・JANコード

名称	材質
本体基台	硬質塩ビ
クッション	ポリ塩化ビニルレザー・ウレタン（内部）
ネット	ナイロン
フック	ポリカーボネート

型式	JANコード
CR-3S	4570078040094
CR-3M	4570078040087
CR-3L	4570078040070

*仕様は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。
*本品は、施設・病院向けの製品です。在宅での使用はできません。

製造元

有限会社
岩田商店
IWATA メディカル事業部

〒125-0033東京都葛飾区東水元1-17-13-2F

電話03-3607-4686 FAX03-3608-2367

<https://www.iwata-company.com>

